

BLUNIX ウォッシャーディスインフェクター

【警告】

＜使用方法＞

- ・ 洗浄槽、被洗浄物は高温になるのでヤケドに注意すること。
[熱水(93℃)の使用によって高温になるため]

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

- ・ 扉に手や体が挟まれないように注意すること。
[ケガのおそれがあるため]
- ・ 警告・注意ラベルをはがさないこと。
[日常の取り扱いに対して警告及び注意を促すことができなくなり、予期せぬトラブルにつながるおそれがあるため]

【形状、構造及び原理等】

〔各部の名称〕



【寸法及び質量】

型 式	外 寸 W×D×H (mm)	質量 (kg)
BLUNIX60P	450×560×660	約50
BLUNIX60B	450×560×660	約50

【必要設備】

電源：単相 AC200V 2.8kVA 50/60Hz ブレーカー止め
または接地極付コンセント D種接地以上

給水：15A 0.1～0.3MPa 5～15L/min 30℃未満

給湯：15A 0.1～0.3MPa 5～15L/min 50℃以下

排水：配管内径25mm以上 排水能力20L/min以上

耐熱温度85℃以上

【使用環境】

周囲温度： 10～40℃
相対湿度： 30～85%RH（結露しないこと）
気 圧： 85～106 kPa（標高1400m以下）

【動作原理】

被洗浄物を専用トレイにセットし、その専用トレイをチャンパー内に収納する。被洗浄物に適した洗浄プログラムを選択する。運転が開始されると、チャンパー内へ給水して設定温度まで加温とともに洗剤を注入し洗浄液を調合する。循環ポンプと回転ノズルによる予洗工程／すすぎ工程／熱水工程、熱風による乾燥工程が洗浄プログラムに従って行われる。全ての処理が終了すると画面表示とブザーで使用者に報知する。

異常が発生すると画面表示とブザーで使用者に報知する。

【洗浄性能】

- ・ 電気ヒーター：2.5kW
- ・ 循環ポンプ：最大流量110L/min×2基

【乾燥性能】

- ・ 乾燥ヒーター：1.0kW

【使用目的又は効果】

本品は、再使用可能な医療器具の（化学的又は加熱）除染・消毒のために用いる洗浄器で乾燥機能を内蔵している。

【使用方法等】

詳細は取扱説明書をご参照ください。

- ① 『MODE [DOOR]』ボタンを押して扉ロックを解除する。
- ② 扉を開けて被洗浄物をセットした専用トレイを入れ、扉を閉じる。
- ③ 『POWER』ボタンを押し、電源をオンにする。
- ④ 『MODE [DOOR]』ボタンを押して洗浄プログラムを選択する。
- ⑤ 『START [ENTER]』ボタンを押し、運転を開始する。運転が完了すると、ブザーと画面表示で知らせる。
- ⑥ 完了画面が表示されたら、『MODE [DOOR]』ボタンを押して扉を開け、専用トレイを取り出す。
- ⑦ 扉を閉じる。

取扱説明書を必ずご参照ください。

*【使用上の注意】

- ① 損傷を受けたトレイを使用すると十分な洗浄効果が期待できないため、新たなものを使用すること。
- ② 洗浄処理終了後、被洗浄物に汚れが残っていないことを確認し、残っている場合は洗浄処理を繰り返すこと。

*【保管方法及び有効期間等】

【耐用期間】

耐用期間：製造出荷後8年〔自己認証（当社データ）による〕

条 件：取扱説明書及び添付文書に記載された取扱注意事項あるいは保守・点検に係わる事項を遵守し、定期的に保守点検を実施すること。
点検結果により、次に示す主要な構成部品や保守点検事項に記載された交換部品を必要に応じ交換すること。

保守部品として供給される主要な構成部品は下表の通り。

主要な構成部品名	使用耐用年数
HEPA フィルター	0.5 年
扉パッキン	1 年
扉内側パッキン	1 年
洗剤フローセンサー	2 年
給水フローセンサー	2 年
洗剤ポンプ	2 年
チェックバルブ	2 年
洗剤チューブ一式	2 年
電磁弁	3 年
回転ノズルリング	3 年または 5000 回運転
制御基板	4 年
乾燥用ファン（ドライヤー）	5 年
ドライヤーゴムリング	5 年
循環ポンプ	5 年
循環ポンプ接続パッキン	5 年
表示基板	5 年
洗浄液加温ヒーター	5 年
排水ポンプ	5 年
排水ポンプ接続パッキン	5 年
温度センサー	5 年

※ここに記載した装置の耐用期間及び主要な構成部品の使用耐用年数は保証期間ではなく、上記の条件を満たした場合での平均的な年数となるため、使用環境、使用方法などにより異なります。

*【保守・点検に係る事項】

詳細は取扱説明書をご参照ください。

【使用者による保守点検事項】

- ・洗浄槽内の清掃 洗浄槽底面の排水フィルター・排水ホルダーを毎回点検し、必要に応じて清掃する。
- ・回転ノズルの清掃 回転ノズル穴をふさいでいる異物と回転ノズル内部ホルダー周りの異物を取り除き、水ですすぐ。
- ・扉パッキンの清掃 扉パッキンに亀裂、変形のないことを確認すること。
- ・HEPAフィルターの交換 6ヶ月毎に交換する。

【業者による保守点検事項】

- ・扉パッキン 1年に1回以上、新品と交換する。
- ・扉内側パッキン 1年に1回以上、新品と交換する。
- ・回転ノズルリング 3年または5000回運転に1回以上、新品と交換する。
- ・乾燥用ファン（ドライヤー） 5年に1回以上、新品と交換する。
- ・ドライヤーゴムリング 5年に1回以上、新品と交換する。
- ・循環ポンプ 5年に1回以上、新品と交換する。
- ・循環ポンプ接続パッキン 5年に1回以上、新品と交換する。
- ・電磁弁 3年に1回以上、新品と交換する。
- ・表示基板 5年に1回以上、新品と交換する。
- ・制御基板 4年に1回以上、新品と交換する。
- ・洗剤フローセンサー 2年に1回以上、新品と交換する。
- ・給水フローセンサー 2年に1回以上、新品と交換する。
- ・洗浄液加温ヒーター 5年に1回以上、新品と交換する。
- ・洗剤ポンプ 2年に1回以上、新品と交換する。
- ・排水ポンプ 5年に1回以上、新品と交換する。
- ・排水ポンプ接続パッキン 5年に1回以上、新品と交換する。
- ・チェックバルブ 2年に1回以上、新品と交換する。
- ・洗剤チューブ一式 2年に1回以上、新品と交換する。
- ・温度センサー 5年に1回以上、新品と交換する。

**【サイバーセキュリティに関する事項】

【問い合わせ先】

サクラ精機株式会社 カスタマーセンター
Tel:0120-037-311(フリーダイヤル)

【意図する使用環境】

- ・インターネット、施設内のネットワークに接続を必要としない独立した環境で使用する装置です。

【使用者が遵守すべきセキュリティ対策】

- ・USBデータポートにはUSBメモリー以外の周辺機器を接続しないこと。
- ・USBメモリーは、使用前に必ずウイルスチェックを行うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名 称：サクラ精機株式会社
電話番号：026-272-8381

製造業者

名 称：RENOSEM Co., Ltd.
国 名：大韓民国

取扱説明書を必ずご参照ください。